

CE 2163 zertifizierte FFP2 Atemschutzmasken



Persönliche Schutzausrüstung
der Kategorie III

EU-Verordnung 2016/425

EN 149:2001 + A1:2009

CE 2163

Material: 5-lagig mit

Nasenbügel und Ohrgummis

Modell: Summit Person FFP2 NR

MHD 08/2023

5 Stück im praktischen, wiederverschließbaren Druckverschlußbeutel

wiederverschließbarer Beutel

geprüfte Qualität

Korrektes Aufsetzen der Atemschutzmaske

- ✓ Maske öffnen und Nasenclip leicht zusammenbiegen, um ihn vorzuformen.
- ✓ Maske zuerst über das Kinn, danach über die Nase ziehen.
- ✓ Fixierbänder hinter den Ohren anbringen.
- ✓ Nasenclip mit beiden Zeigefingern andrücken.

Atemschutzmasken / Filtrierende Halbmasken FFP2

Einsatz

Filtrierende Halbmasken FFP2 gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und haben die Zweckbestimmung, den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen.

Eigenschaften

Die Atemschutzmaske ist gefaltet, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ohne Ventil. Die FFP2-Maske filtert $\geq 94\%$ der in der Luft befindlichen Partikel. Damit bietet sie auch hohen Schutz vor einer Übertragung bzw. Ansteckung bei einer Tröpfchen-Infektion. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und weichem Nasenkissen bietet hohen Tragekomfort. Die ummantelten Elastikbänder ermöglichen einen sicheren Sitz der Maske.

**Die Sicheneder GmbH ist seit über 30 Jahren
ein zuverlässiger Partner der Apotheken.**

Gerne senden wir Ihnen das CE-Zertifikat und die EU-Konformitätserklärung auf Anforderung zu, oder Sie können die Bescheinigungen auf unserer Homepage unter www.sicheneder.de/FFP2_Summit.pdf downloaden.

Hersteller: Zhejiang Dianfeng Industrial Co., Ltd.

CE 2163

Importeur:

SICHENEDER GmbH | Neuburger Str. 128 | 94036 Passau | Germany

www.sicheneder.de